

## ***Licowanie podbudów cyrkonowych licówkami novo.lign z wolnej ręki***

**1.** Strukturę z niebarwionego cyrkonu wypiąskować czystym piaskiem 110µm pod ciśnieniem max. 3 bar, zwracając przy tym uwagę, aby odległość między obiektem, a dyszą nie była mniejsza niż 3 cm.

**PO PIASKOWANIU NIE NALEŻY UŻYWAĆ WYTWORNICY PARY, ANI DOTYKAĆ OBIEKTU PALCAMI.**

**2.** Na wypiąskowane powierzchnie struktury nanieść cienko MKZ Primer i pozostawić do kilka minut do odparowania.

**3.** Opaker combo.lign o odpowiednim kolorze wymieszać z katalizatorem w stosunku 1:1 i cienko nanieść na strukturę cyrkonową. Opaker polimeryzuje w lampie 3 min.

**4.** Licówkę novo.lign wypiąskować po stronie wewnętrznej oraz na stycznych i przyszyjkowych krawędziach przejść tlenkiem glinu ( 110µm) pod ciśnieniem max. 3 bar, zwracając przy tym uwagę, aby odległość między obiektem, a dyszą nie była mniejsza niż 3 cm .

**5.** Na wewnętrzną stronę licówki nanieść cienko primer visio.link i naświetlić przez 90 sekund, tak aby na jej powierzchni powstał jedwabisty mat.

**6.** Na zaopakerowaną strukturę nanieść materiał klejący combo.lign o dobranym kolorze i docisnąć do niego skondycjonowaną primerem licówkę, a po usunięciu jego nadmiarów dokonać wstępnego naświetlenia w celu ustabilizowania konstrukcji. Po kontroli wzrokowej dokonać polimeryzacji końcowej materiału combo.lign przez 3 min.

**7.** Licówkę i strukturę protezy obmodelowuje się do kształtów anatomicznych materiałem crea.lign wymieszonym z płynem modelling. liquid tak, aby koniecznie wszędzie pokrył materiał combo.lign. Polimeryzację pośrednią wykonuje się za pomocą lampy ręcznej min 3min. Polimeryzacja końcowa trwa 6 min.

**NALEŻY PAMIĘTAĆ, ABY GRUBOŚĆ CAŁEGO LICOWANIA NIE PRZEKRACZAŁA 2 mm.**

**8.** Po polimeryzacji końcowej całość wylicowanej protezy należy dokładnie umyć w alkoholu celem pozbycia się warstwy dyspersyjnej i delikatnie opracować frezem w klasyczny sposób.

**9.** Polerowanie żywicy crea.lign wykonuje się pastą Acrypol i miękkimi szczotkami (3-8 tys. obr./min.), a końcowe polerowanie bardzo małą ilością nabłyszczającej pasty Abraso-Star-Glanz i miękkim barankiem. Pastą Acrypol nie należy polerować licówek, a tylko powierzchnie modelowane z wolnej ręki, czyli dośluzówkowe, językowe i styczne.