

## ***Licowanie podbudów z niebarwionego cyrkonu polimerem crea.lign freestyle***

**1.** Strukturę z barwionego cyrkonu wypiąskować czystym piaskiem 110µm pod ciśnieniem max. 3 bar, zwracając przy tym uwagę, aby odległość między obiektem, a dyszą nie była mniejsza niż 3 cm.

**PO PIASKOWANIU NIE NALEŻY UŻYWAĆ WYTWORNICY PARY, ANI DOTYKAĆ OBIEKTU PALCAMI.**

**2.** Na wypiąskowane powierzchnie nanieść cienko MKZ Primer i pozostawić kilka minut do odparowania.

**3.** Opaker crea.lign nanieść cienko na wyschniętą strukturę i naświetlić przez 180 sekund.

**4.** Polimer crea.lign w paście lub żelu warstwowo nakładać na zaopakerowany obiekt i każdą nałożoną warstwę polimeryzować 90 sek. zgodnie z zasadami licowania żywicami światło utwardzalnymi .

**NALEŻY PAMIĘTAĆ, ABY GRUBOŚĆ CAŁEGO LICOWANIA NIE PRZEKRACZAŁA 2 mm.**

**5.** Po wymodelowaniu korony przystąpić do polimeryzowania ostatecznego trwającego 6 min.

**6.** Po polimeryzacji końcowej całość wylicowanej protezy należy dokładnie umyć w alkoholu celem pozbycia się warstwy dyspersyjnej i delikatnie opracować frezem w klasyczny sposób.

**7.** Polerowanie wstępne części licowanej wykonuje się pastą Acrypol i miękkimi szczotkami (3-8 tys. obr./min.), a końcowe polerowanie bardzo małą ilością nabłyszczającej pasty Abraso-Star-Glanz i miękkim barankiem.