

Multisil-definator matowy

Matowanie powierzchni silikonów

- matowi powierzchnie silikonowych protez stwarzając naturalny wygląd
- chroni powierzchnie protezy przed zabrudzeniami i ułatwia czyszczenie
- zawiera w składzie filtr UV zabezpieczający silikon przed przebarwieniami
- znacząco zwiększa komfort noszenia protezy przez pacjenta



Matowy definator
zestaw
zam. nr 540 0109 4

Primer
10 ml
zam. nr 540 0109 1

Coating
20 ml
zam. nr 540 0109 2

Proszek matujący
10 g
zam. nr 540 0109 3



1
Primer cienko nanieść na powierzchnie protezy.



2
Farbami malarskimi można indywidualizować protezę.




3
Coating zostaje naniesiony pędzelkiem, cienkimi warstwami.



4
Suszyć ok. 2 min. w temperaturze 65st. C° (np. gorącym powietrzem).



5
Po upływie 15 minut nanieść proszek matujący.

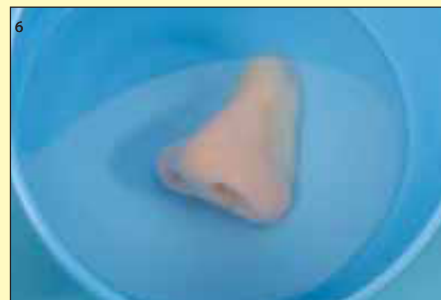

6
Epitezę położyć na dwie minuty w gorącej wodzie.