

# Technika odwróconego licowania

## “Technika odwróconego licowania”

Tradycyjne uzupełnienia żywiczne są wytwarzane przy użyciu bezpośredniej techniki dodawania. Metoda ta została jednak zrewolucjonizowana poprzez zastosowanie odwrotnej techniki nakładania warstw.

Przy zastosowaniu tej metody, ogromne znaczenie ma wykonanie wax-up'u, ponieważ sukces odbudowy protetycznej w dużej mierze zależy właśnie od starannej i precyzyjnej pracy wosku.

Podczas stosowania omawianej techniki należy mieć na uwadze fakt, że stosowanie konwencjonalnych, płynnych kompozytów stwarza duże ryzyko niepowodzenia, ze względu na ich ograniczoną stabilność.

Dlatego też, podstawą jest zastosowanie właściwego materiału, który nie jest podatny na pęknięcie i posiada wysoką wytrzymałość mechaniczną.

Omawiana technika licowania może być stosowana we wszystkich rodzajach uzupełnień protetycznych, a w szczególności w:

- TECHNICE BEZ PREPARACJI
- MINIMALNIE INWAZYJNEJ PREPARACJI
- INLAY-ONLAY-OVERLAY
- ZŁOŻONYCH PRZYPADKACH Z LUB BEZ PODKONSTRUKCJI

(stopy metali, tlenek cyrkonu, włókna szklane, PEEK) W opisie tej metody krok po kroku, transparentny klucz silikonowy (twardość 60 wg. Shore'a) jest wykonywany po zrobieniu wax-up'u. Klucz ten ma za zadanie odtworzenie wszystkich detali modelu w bardzo precyzyjny sposób. Po jego przygotowaniu można rozpocząć licowanie; materiał transparentny oraz pierwsza warstwa dentyny jest nakładana przed nałożeniem dentyny o różnym poziomie nasycenia.

lign